

Beter thuisgebruik van ondersteunde hulpmiddelen

De VELA-stoel




Inleiding

Ondersteunende technologieën kunnen een groot verschil maken in het alledaagse leven van mensen met een handicap, aangezien deze hen in staat stellen om dagdagelijkse activiteiten uit te voeren. Dit geldt ook voor de VELA-stoel, welke ontwikkeld werd door VELA in de jaren zeventig en sindsdien erg populair is geworden bij mensen met een handicap die op zoek zijn naar oplossingen om een grotere autonomie te bekomen.

De reden waarom de VELA-stoel vandaag de dag zo populair is, is dezelfde als vijftig jaar geleden in de jaren zeventig: de centrale rem waarmee van de stoel is uitgerust zorgt voor veiligheid en stelt de gebruiker in staat om allerlei verschillende activiteiten uit te voeren die voorheen niet langer mogelijk waren. Tegelijkertijd is de VELA-stoel een mobiele stoel met soepele vlot rijdende wieltjes die de gebruiker al zittend in staat stellen om de stoel rond te wandelen/'trippelen'.

De VELA-stoel is beschikbaar met manuele of elektrische hoogteverstelling. De elektrische hoogteverstelling vermindert ongemakkelijke en pijnlijke bewegingen en schokken terwijl de stoel bewogen wordt tijdens de hoogteverstelling. Daarnaast ondersteunt de elektrische hoogteverstelling mensen die snel uitgeput zijn, lijden aan een verminderd evenwicht of weinig kracht hebben in de benen hebben om hun van een zittende naar staande positie te brengen.

Op de volgende pagina's worden de concrete voordelen voor de gebruiker en zorgverlener beschreven vanuit een perspectief dat gebaseerd is op het alledaagse leven van personen met een handicap die een VELA-stoel gebruiken.

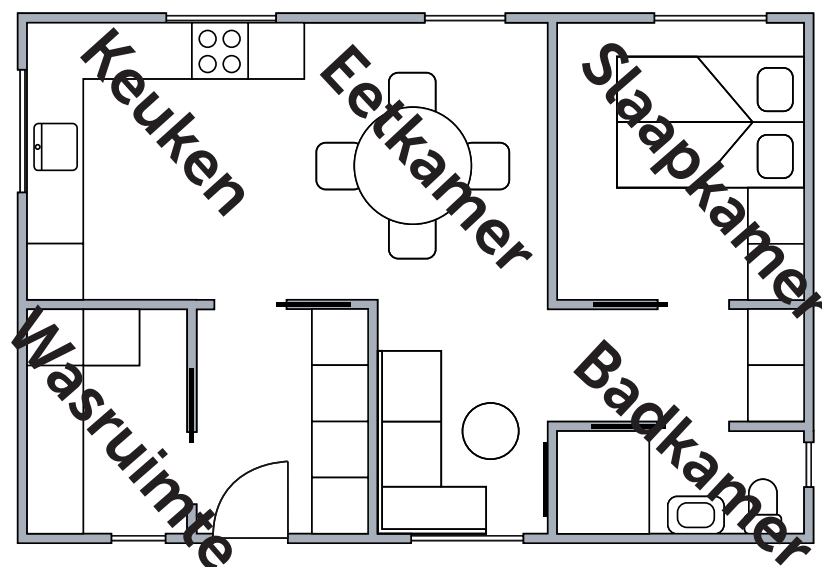

Een VELA-stoel voorziet zelfredzaamheid/ autonomie bij:	
	Mobilisatie en transfer
	Verhoogd bereik
	Koken
	Koelkast
	Bovenkast
	Vaatwasser
	Wasmachine
	Was ophangen
	Strijken
	Persoonlijke zorg
	Toiletbezoeken
	Kleerkast
	Aankleden
	Planten watergeven
	Schoonmaken
	Stofzuigen

De VELA-stoel



STABILITEIT EN MOBILITEIT

De rem zorgt ervoor dat je stabiliteit krijgt voor verschillende activiteiten. En de lichtlopende wielen maken je mobiel, zodat je je thuis gemakkelijk zittend kunt verplaatsen.



OPTIMAAL COMFORT EN ERGONOMIE

Je kunt de stoel verstellen om de best mogelijke ergonomie en comfort te krijgen die precies aan je behoeften voldoen - en de stoel gaat vele jaren mee.




BEREIK NIEUWE HOOGTEN

Met de elektrische liftfunctie kun je energie besparen als je naar de kast reikt of de afwasmachine leegmaakt. Deze functie kan ook gebruikt worden als hulp om uit de stoel op te staan.



ELKE DAG VEILIG

Je zit veilig en stevig - daar zorgt de rem voor. Je profiteert ook van stabiele armleuningen en een goede, steunende rugleuning. Zo voel je je volkomen veilig als je in onze stoel zit.

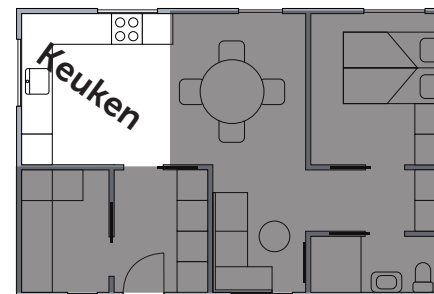

Keukenactiviteiten!

Werken in de keuken kan een onoverkomelijke uitdaging zijn voor mensen met een handicap. Een slecht evenwicht en verminderde kracht in de benen kan

hun autonomie bij allerlei verschillende taken in de keuken beperken, aangezien ze sneller uitgeput geraken in een staande positie en dit het risico verhoogt op duizeligheid en vallen. Daarnaast kan er een bijkomend risico gekoppeld zijn aan het gebruik van messen en hete potten. Mensen met een handicap kunnen het ook moeilijk hebben om de faciliteiten van de keuken op een optimale manier te benutten. Zo moeten ze bijvoorbeeld in staat zijn om zich in de keuken rond te bewegen, hoog te reiken naar voedsel in een koelkast en toegang te kunnen verkrijgen tot lagere kasten, lades of de vaatwasser.

De VELA-stoel kan heel wat van deze problemen verhelpen en de gebruiker ondersteunen in zowel een zittende als staande positie. Zo is de VELA-stoel bijvoorbeeld uitgerust met vier vlot rijdende wieltjes die de gebruiker in staat stellen om de stoel rond te 'trippelen' in een zittende positie. De centrale rem van de VELA-stoel daarentegen zorgt voor stabiliteit en veiligheid in zowel hoge als lage verstellingen.



Mobilisatie en transfer



Verhoogd bereik



Koken



Koelkast



Bovenkast



Vaatwasser



Wasmachine



Was ophangen



Strijken



Persoonlijke zorg



Toiletbezoeken



Kleerkast



Aankleden



Planten watergeven



Schoonmaken



Stofzuigen

Voorbeeld:

KOKEN

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: Om te gaan met keukenapparatuur en voedsel met twee handen terwijl men in een veilige stoel zit die van een rem is voorzien
- :: Al zittend aan het fornuis te koken met een verstelbare en correcte werkhogte, wat ervoor zorgt dat de gebruiker beter hete potten kan verplaatsen en omlaag in de pot kan kijken
- :: Zich in een zittende positie rond te bewegen in de keuken doordat men de stoel kan 'trippelen' of zichzelf kan rond duwen of trekken terwijl men eten in de handen heeft, bv. van en naar de koelkast
- :: In een zittende positie bovenkasten of een hoog geplaatste magnetron te bereiken dankzij de elektrische hoogteverstelling



Bekijk video door de QR-code te scannen of bezoek: VL1935.dk/cooking

Voorbeeld:

Vaatwasser

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: Meer bereik te hebben vanuit een zittende positie, bijvoorbeeld door de stoel laag te verstellen wanneer de vaatwasser geleegd moet worden of hoog om de propere vaat terug in de kast te plaatsen
- :: Men kan werken met twee handen, bijvoorbeeld om de vaatwasser te vullen/leggen of de vaat met de hand te doen terwijl men in een veilige stoel met centrale rem zit
- :: Mensen met een verminderde kracht in de benen of een slecht evenwicht kunnen de vaat met de hand wassen in een zittende positie en zo hun energie te sparen



Bekijk video door de QR-code te scannen of bezoek: VL1935.dk/dish



Etenstijd!

De meeste mensen associëren etenstijd met goed eten, leuk gezelschap en gezelligheid. Voor anderen is het moment een uitdaging vanwege pijn of een handicap die het hen moeilijk maakt om sedentaire activiteiten uit te voeren aan de eettafel. De VELA-stoel helpt de optimale omstandigheden tot stand te brengen tijdens de maaltijd aangezien de stoel een ergonomische en functionele zitpositie mogelijk maakt. Een goede zitpositie is belangrijk om moeiteloos te kunnen eten en drinken en vermindert het risico op verslikking.

De mobilisatie en de transfer van en naar de eettafel alsook deelname aan het dekken van de tafel is een element dat vaak over het hoofd gezien wordt bij personen met een handicap. Voor gebruikers met verminderd evenwicht en verminderde kracht in de benen, is de stoel een geweldig hulpmiddel om zich al zittend te verplaatsen. Daarnaast stelt de VELA-stoel hen ook in staat om de tafel volledig of deels autonoom klaar te maken voor etenstijd of andere activiteiten die hun zelfvoorziening en zelfvertrouwen kunnen verhogen.



Mobilisatie en transfer



Verhoogd bereik



Koken



Koelkast



Bovenkast



Vaatwasser



Wasmachine



Was ophangen



Strijken



Persoonlijke zorg



Toiletbezoeken



Kleerkast



Aankleden



Planten watergeven



Schoonmaken



Stofzuigen

Voorbeeld:

De tafel dekken

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: In een zittende positie voedingswaren te nemen die zich bevinden in een lage of hoge voorraadkast dankzij de elektrische hoogter verstelling
- :: In een zittende positie met de stoel rond te 'trippelen' en autonoom te bewegen van en naar de eetkamer met voedsel of eetgerei in de handen dankzij de vier vlot rijdende wieltjes van de stoel
- :: De eettafel te dekken met servies en eten terwijl men veilig in de stoel zit dankzij de centrale remfunctie

Voorbeeld:

Eten

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: In een zittende positie rond te bewegen in de eetkamer en de stoel te verstellen in verhouding met de hoogte van de tafel. Vervolgens kan de rem ingeschakeld worden om stabiliteit en veiligheid te bekomen tijdens de maaltijd
- :: Comfortabel te zitten in een verstelbare ergonomische stoel waardoor de gebruiker in staat is om een lange tijd aan de eettafel te spenderen en sociaal contact te hebben tijdens de maaltijd



Bekijk video door de QR-code te scannen of bezoek: VL1935.dk/eat



Was en plas!

Elke dag thuis schoonmaken kan een veeleisende en zelfs onmogelijke opdracht zijn voor mensen met een handicap. Om te kunnen schoonmaken, moet men beschikken over een goed evenwicht, mobiliteit en kracht in de benen, en moet men daarnaast ook vaak beide handen vrij hebben om een aantal activiteiten uit te voeren. Voor mensen met een handicap is het vaak energie-efficiënt om deze taken al zittend uit te voeren, aangezien ze op die manier hun evenwicht kunnen behouden en de mogelijkheid hebben om korte rustpauzes in te lassen.

De VELA-stoel voorziet steun en mobiliteit tijdens het schoonmaken, zodat men al zittend met de stoel kan rond bewegen in het huis en met beide handen kan stofzuigen of het stof afnemen. De elektrische hoogteverstelling vergroot het bereik van de gebruiker, zodat deze kleren uit een laaggeplaatste was- of hooggeplaatste droogmachine kan halen. De rem waarmee de stoel is uitgerust garandeert een stabiele, veilige werkplaats, bv. om kleren op te hangen of tijdens het strijken.



Mobilisatie en transfer



Verhoogd bereik



Koken



Koelkast



Bovenkast



Vaatwasser



Wasmachine



Was ophangen



Strijken



Persoonlijke zorg



Toiletbezoeken



Kleerkast



Aankleden



Planten watergeven



Schoonmaken



Stofzuigen

Voorbeeld:

Schoonmaken

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: In een zittende positie dankzij de elektrische hoogteverstelling van de stoel hoog of laag te reiken, bijvoorbeeld om het stof af te nemen
- :: In een zittende positie te stofzuigen zonder het evenwicht te verliezen, aangezien de stoel een veilige en stabiele werkomgeving biedt
- :: De stoel rond te 'trippelen' met de benen dankzij de vier vlot rijdende wieltjes en tegelijkertijd te stofzuigen aangezien de gebruiker de handen vrij heeft
- :: Individuele schoonmaakactiviteiten uit te voeren met een actieve ergonomische werkhouding door de zitting voorwaarts te kantelen en de goede rugsteun
- :: Energie te sparen tijdens het schoonmaken vanuit een zittende positie en korte rustpauzes in te lassen wanneer nodig bij verminderd evenwicht en verminderde kracht in de benen



Bekijk video door de QR-code te scannen of bezoek: VL1935.dk/clean

Voorbeeld:

Kleren wassen

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: In een zittende positie dankzij de elektrische hoogteverstelling de stoel laag in te stellen om bv. kleren in de wasmachine te plaatsen, of hoog om de droogmachine te bedienen
- :: Zich rond te bewegen met de wasmand op de dijen of met de stoel te 'trippelen' aangezien deze is uitgerust met vlot rijdende wieltjes
- :: Over twee vrije handen te beschikken om bijvoorbeeld kleren op te hangen vanuit een zittende positie met de centrale rem ingeschakeld zodat men het evenwicht niet verliest
- :: Comfortabel te zitten in een ergonomische stoel die versteld kan worden met een voorwaarts gekantelde zitting en goede rugsteun die activiteiten ondersteunt zoals het ophangen van kleren
- :: Door een verhoogd bereik vanuit een zittende positie ongemakkelijke bewegingen van de rug of schouder te voorkomen aangezien de stoel aan elke activiteit kan aangepast worden



Bekijk video door de QR-code te scannen of bezoek: VL1935.dk/laundry



Persoonlijke zorg!

Activiteiten zoals toiletbezoeken en persoonlijke zorg kunnen een dagelijkse uitdaging en bezorgdheid zijn voor mensen met een handicap. Vaak wordt er heel wat zelfwaardigheid gekoppeld aan dergelijke activiteiten, zoals het poetsen van de tanden, kammen van het haar en scheren. Het is daarom vaak moeilijk voor mensen met een handicap om te accepteren dat ze deze activiteiten in de badkamer niet langer autonoom kunnen uitvoeren.

De VELA-stoel maakt het mogelijk voor de gebruiker om zich volledig onafhankelijk vanuit een zittende positie rond te bewegen in de badkamer. De verstelbaarheid van de stoel maakt het daarnaast ook eenvoudiger en veiliger om zichzelf op en van het toilet te bewegen. De elektrische hoogteverstelling zorgt bovendien dat men de werkhoogte voor elke activiteit aan de spiegel en wastafel kan aanpassen.



Mobilisatie en transfer



Verhoogd bereik



Koken



Koelkast



Bovenkast



Vaatwasser



Wasmachine



Was ophangen



Strijken



Persoonlijke zorg



Toiletbezoeken



Kleerkast



Aankleden



Planten watergeven



Schoonmaken



Stofzuigen

Voorbeeld:

Toiletbezoeken

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: Zich van en naar de badkamer te bewegen, aangezien men de stoel kan rond te 'trippelen' met de benen dankzij de vlot rijdende wieltjes die aangepast kunnen worden aan verschillende oppervlaktesoorten, bv. tegels
- :: Zichzelf op en van het toilet te verplaatsen, dankzij de centrale remfunctie, naar voren gekantelde zitting en verstelbare armsteunen die zorgen voor een veilige en eenvoudige transfer van de stoel naar het toilet en omgekeerd
- :: Zelfstandig het toilet te gebruiken aangezien de gebruiker niet langer hulp nodig heeft om naar de badkamer te gaan. Dit promoot de autonomie en verhoogt de levenskwaliteit op dagelijkse basis

Voorbeeld:

Persoonlijke hygiëne

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: Veilig en stabiel in een stoel te zitten dankzij de centrale remfunctie en terwijl beide handen te gebruiken om zich te wassen, scheren, de tanden te poetsen of make-up op te doen
- :: In een zittende positie de hoogte van de stoel te verstellen voor allerlei verschillende activiteiten aan de wastafel en spiegel met behulp van de elektrische hoogteverstelling
- :: Vanuit een zittende positie de stoel rond te 'trippelen' en zich daardoor autonoom rond te bewegen dankzij de vier vlot rijdende wieltjes van de stoel om activiteiten uit te voeren zoals het nemen van een handdoek of tandenborstel in de kast



Bekijk video door de QR-code te scannen of bezoek: VL1935.dk/care



Bedtijd!

De vermoeidheid komt op en het is tijd om naar bed te gaan. De beschikbare energie voor de dag is opgebruikt, wat een grote impact heeft op het functioneren en de concentratie. Vermoeidheid en een gebrek aan energie is een probleem dat mensen met een handicap dagelijks ervaren. De VELA-stoel stelt gebruikers met verminderde kracht in de benen of een verminderd evenwicht in staat energie te sparen en zelfvoorzienend te zijn tijdens het aan- en uitkleden en slapengaan.

De VELA-stoel voorziet ondersteuning en stabiliteit en maakt het mogelijk om zich vanuit een zittende positie rond te bewegen en vanuit de stoel in bed te gaan en omgekeerd, wat het risico op vallen vermindert. De elektrische hoogteverstelling helpt vermoeide gebruikers daarnaast ook bij het opstaan. De VELA-stoel kan in de hoogte worden versteld voor elke specifieke activiteit, wat het aantal oncomfortabele bewegingen van de rug en schouders reduceert, bv. bij het aan- en uitkleden.



Mobilisatie en transfer



Verhoogd bereik



Koken



Koelkast



Bovenkast



Vaatwasser



Wasmachine



Was ophangen



Strijken



Persoonlijke zorg



Toiletbezoeken



Kleerkast



Aankleden



Planten watergeven



Schoonmaken



Stofzuigen

Voorbeeld:

Van en naar bed

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: Mobilisatie en transfer vanuit het bed naar de stoel en omgekeerd zonder begeleiding uit te voeren, aangezien de remfunctie van de stoel stabiliteit garandeert en het risico op vallen vermindert
- :: De gebruiker van een zittende naar staande positie te helpen gaan dankzij de elektrische hoogteverstelling
- :: Zelfstandig op te staan of naar bed te gaan, aangezien de gebruiker doorgaans niet kan rekenen op hulp



Bekijk video door de QR-code te scannen of bezoek: VL1935.dk/bed

Voorbeeld:

Aankleden

DE VELA-STOEL MAAKT HET MOGELIJK OM:

- :: Vanuit een zittende positie zich rond te bewegen in de slaapkamer dankzij de vlot rijdende wieltjes van de stoel en kleren te nemen uit hoge of lage kasten
- :: Vanuit een zittende positie hoog of laag te reiken dankzij de elektrische hoogteverstelling
- :: Veilig en stabiel in een stoel te zitten dankzij de centrale remfunctie, met twee vrije handen om kleren te nemen te plaatsen in de kleerkast
- :: Zich meer zelfstandig aan te kleden aangezien de stoel laag vermeld kan worden, wat het aantal ongemakkelijke bewegingen van de rug, schouders en onbedoeld bukken voorkomt



Bekijk video door de QR-code te scannen of bezoek: VL1935.dk/clothes

Voordelen voor de gebruiker en zorgverlener wanneer de VELA-stoel als hulpmiddel wordt gebruikt

De VELA-stoel voegt bij zowel gebruikers als zorgverleners waarde toe aan heel wat dagdagelijkse activiteiten in de keuken, badkamer, waskamer en woonkamer.

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER:

- :: Grotere gemoedsrust door comfort, minder transfers en een goede ergonomie
- :: Mogelijkheid tot meer betrokkenheid, autonomie en waardigheid bij persoonlijke zorg alsook een groter zelfvertrouwen
- :: Grotere zelfredzaamheid bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten wat verlichting biedt aan partners of familieleden
- :: Verhoogde levenskwaliteit – waaronder een verhoogd welzijn, meer waardigheid en comfort
- :: Beter hygiëne en dus betere gezondheid omdat men zonder begeleiding gebruik kan maken van het toilet en de wastafel
- :: Autonomie en flexibiliteit alsook de mogelijkheid tot zelfbeschikking en verhoogde beheersing van dagelijkse activiteiten

VOORDELEN VOOR DE ZORGVERLENER:

- :: Beter werkomgeving door minder transfers en betere houding zonder onnodige belasting van het lichaam
- :: Beter gebruik van werkmiddelen door bespaarde tijd. Deze tijd kan besteed worden aan flexibelere werkuren zodat de zorgverlener meer mensen kan helpen, met een primaire focus op de meest zorgbehoevenden
- :: Indien een gebruiker autonoom basistaken kan uitvoeren, zoals toiletbezoeken en transfers van en naar het bed, kunnen zorgverleners hun werkzaamheden beter organiseren, wat leidt tot minder stress en een verhoogde flexibiliteit
- :: Verhoogde zelfredzaamheid leidt tot minder conflicten met gebruikers die lijden aan ziektes of kwalen zoals dementie en cognitieve gebreken, waardoor de levenskwaliteit van familieleden en partners kan verhogen

Stoelen met elektrische hoogteverstelling hebben veel voordelen



In veel opzichten kunnen stoelen met elektrische hoogteverstelling een essentiële hulp zijn in het dagelijks leven, en de mobiliteit, het evenwicht en de onafhankelijkheid positief beïnvloeden.

Elektrische hoogteverstelling kan voordelig zijn als de gebruiker pijn in zijn handen heeft, het niet verdraagt zijn lichaam te draaien, of vaak last heeft van duizeligheid.

De elektrische hoogteverstelling is ook geschikt voor wie de stoel zachtjes moet laten stijgen en dalen, bv. als je last hebt van een rugaandoening of pijn.



ENERGIE BESPAREN

Een stoel met elektrische hoogteverstelling zorgt ervoor dat men geen onnodige energie hoeft te gebruiken bij het in de vaatwasser zetten van borden, het pakken van een trui boven in de kleerkast of het poetsen van de tanden.



HULP BIJ HET OPSTAAN

De elektrische hoogteverstelling kan de gebruiker ook helpen bij het opstaan. Met een druk op de knop gaat de zitting zachtjes omhoog, en de gebruiker kan veilig opstaan met een minimum aan inspanning. En de stoel geeft de nodige steun bij het hervinden van het evenwicht.



MAAK ELKE DAG GEMAKKELIJKER

Een stoel met elektrische hoogteverstelling kan koken, persoonlijke verzorging en andere noodzakelijke dagelijkse activiteiten veel moeitelozer en hanteerbaarder maken. Door meer dagelijkse taken zelf te doen, is het ook mogelijk minder afhankelijk te worden van de hulp van anderen - en onafhankelijkheid leidt tot een betere kwaliteit van leven.



Watch a video by scanning the QR code or visit: <https://vl1935.dk/standup>



Deense kwaliteit

VELA is een Deens familiebedrijf dat in 1935 werd opgericht door Vermund Larsen. VELA heeft haar hoofdkantoor in Aalborg en haar eigen productie-, werkplaats-, verkoop- en marketingafdelingen.

STOELN GEBOUWD MET ZORG EN PRECISIE

Bij VELA focussen we constant op het optimaliseren van veiligheid, functionaliteit en ontwerp in samenwerking met onze beroepstherapeuten, die altijd zorgen voor het ergonomisch comfort van de gebruikers.

We houden altijd rekening met een hoge mate van slijtage aangezien de stoel doorgaans dagelijks meerdere uren wordt gebruikt. Daarom maakt VELA steeds gebruik van hoogwaardige materialen, zoals duurzame mechanische onderdelen, zodat de stoelen er mooi uitzien en jarenlang gebruikt kunnen worden.

Alle VELA-stoelen worden in Denemarken vervaardigd. De stoel wordt pas geassembleerd nadat deze wordt besteld, waardoor we individueel op maat kunnen leveren.

