

## Heupsteunen

Zijn aan de zitting bevestigd. De breedte kan worden ingesteld door de twee bouten los te draaien met de 4 mm inbussleutel. Stel naar wens in en zet de bouten stevig vast.

## Hoekzit en hoofdsteun

Kunnen omhoog en omlaag worden geregeld door de twee bouten (achter het kussen op de hoekzit) los te draaien. Schuif omhoog of omlaag naar de gewenste positie en zorg ervoor dat de bouten degelijk vastgezet zijn.

## Gordels

Er zijn diverse gordels leverbaar voor gebruik in combinatie met de stoelen. Ze ondersteunen de goede houding om de positie van het kind te verbeteren wanneer het zit. Zodra het kind in de stoel zit, zet u het vast met de gordels voor u iets anders doet. Alle gordels zijn stevig op de stoel bevestigd en regelbaar.

### **BELANGRIJK**

Deze stoel is zeer veelzijdig en afgestemd op de noden van kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden. Er zijn talrijke speciale aanpassingen leverbaar.

Als u vervangonderdelen wenst of als u twijfels heeft over het verdere veilige gebruik van uw Breezi, Teezi Breezi en Breezi Max, neem dan gerust contact op met onze klantendienst op 01179 666 761



131 South Liberty Lane, Ashton Vale, Bristol, BS3 2SZ  
Tel.: +44 (0) 1179 666 761  
[info@beshealthcare.net](mailto:info@beshealthcare.net)  
EOE



# Breezi gebruiker instructies

De regelbare stoel voor kinderen met uiteenlopende noden

## **BELANGRIJK - LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK**

**Wanneer deze instructies niet worden opgevolgd, met name wat de bewegende delen betreft, kan de gebruiker risico lopen.**

### **Voor u uw Breezi gebruikt**

Voor het gebruik moeten de onderdelen/producten in elkaar worden gezet. Als u vragen heeft over dit product, stel ze dan gerust voor u het product gebruikt. **BES Healthcare adviseert een therapeut te raadplegen om steunen aan te passen.** Het product mag uitsluitend op een effen vloer worden gebruikt.

### **Zorg altijd voor een goed onderhoud van de producten**

Reinig de producten regelmatig met een niet-schurend schoonmaakmiddel om de maximale levensduur te verzekeren. Wanneer u veranderingen in de prestaties vaststelt, dient u indien nodig voor meer advies contact op te nemen met BES Healthcare. Het is aan te bevelen het product wekelijks te controleren om na te gaan of alle bevestigingen en bouten degelijk verbonden en vastgezet zijn. Dit geldt voor het product en eventueel aangebrachte accessoires.

### **Voorzorgsmaatregelen voor stoelen met zwenkwielen**

Dit product mag niet worden gebruikt als mobiliteitsmiddel. Zwenkwielen vergemakkelijken het basistransport (bijv. van de ene kamer naar de andere). Zet de remmen aan bij stationair gebruik. Duw het product niet vooruit wanneer de remmen aangezet zijn of wanneer de eindgebruiker in de stoel zit. Duw het product niet aan de hoofdsteun. Leun er niet op en plaats geen overmatig gewicht op de plaat.

### **Veiligheid**

Alle veiligheidsgordels die op de stoel aangebracht zijn, moeten worden aangedaan wanneer het product in gebruik is. Laat kinderen niet achter zonder toezicht. Laat andere kinderen niet op de uitrusting klimmen. Dit product bevat kleine onderdelen - wees voorzichtig met jonge kinderen.

**TEEZI MAXIMAAL GEBRUIKERGEWICHT 65 KG, BREEZI MAXIMAAL GEBRUIKERGEWICHT 75 KG, BREEZ MAX MAXIMAAL GEBRUIKERGEWICHT 85 KG**

### **Als er een probleem is met uw stoel**

Gebruik het product niet of laat anderen het product niet gebruiken wanneer u vermoedt dat er iets defect of gebroken is. Neem voor advies onmiddellijk contact op met BES Healthcare.

### **Gebruik met producten van andere fabrikanten**

Dit product voldoet aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen. Het is niet getest in combinatie met producten van andere fabrikanten. **Gebruik uitsluitend** accessoires die door BES Healthcare voor gebruik aanbevolen zijn.

## **Uw Breezi voor het eerst instellen**

Bij levering is uw stoel ingesteld volgens de specificaties die werden overeengekomen tijdens de evaluatie. Als de noden van het kind veranderd zijn, raadpleegt u het hoofdstuk "AANPASSING". Accessoires worden meestal voor de levering op de stoel bevestigd. Om verpakkingsredenen kunnen de platen, hoofdsteunen en mobiele frames afzonderlijk ingepakt zijn.

**CONTROLEER OF U ALLE BESTELDE ONDERDELEN HEEFT ONTVANGEN VOOR U DE STOEL GEBRUIKT (INCLUSIEF DE INBUSSLEUTEL OM AANPASSINGEN UIT TE VOEREN).**

## **Uw Breezi aanpassen**

**OM DE VEILIGHEID EN STABILITEIT VAN DE STOEL TE VERZEKEREN, MOETEN DE VERBINDINGSSTANGEN WORDEN AANGESPANNEN TELKENS WANNEER EEN AANPASSING WORDT UITGEVOERD. HET IS OOK AAN TE BEVELEN DEZE FUNCTIE WEKELIJKS TE CONTROLEREN EN AAN TE SPANNEN, OM ZEKER TE ZIJN DAT DE ZITTING EN DE VOETPLAAT STEVIG VASTZITTEN.**

We adviseren met alle aanpassingen aan de bovenzijde van de stoel te beginnen, om de optimale positionering van het kind ten opzichte van het activiteit oppervlak te verzekeren.

### **Zitting hoogte**

Om de zitting te verhogen of te verlagen, steekt u de inbussleutel (meegeleverd) in de gaten in het frame die in lijn staan met elk uiteinde van het beige stangen. Draai de inbussleutel linksom om de bouten los te draaien, maar verwijder ze niet volledig.

Verwijder de zitting en plaats ze in de gewenste positie; zorg ervoor dat de rand van de zitting de volledige lengte van de bevestigingsgroeven vult. Het is belangrijk dat u, zodra de zitting op haar nieuwe plaats staat, de stangen\* opnieuw vastzet.

### **Zitting diepte**

Maak de verbindingstangen los zoals hierboven beschreven. Pas de diepte aan door de zitting vooruit of achteruit te schuiven; zorg ervoor dat de rand van de zitting de volledige lengte van de bevestigingsgroef vult. Zet de stangen weer goed vast.

### **Voetplank**

Om de voetplank aan te passen, volgt u gewoon de instructies voor ZITTINGHOOGTE en ZITTINGDIEPTE.

### **Voorzettafel**

U kunt de positie van de plaat met maximaal 50 mm vooruit of achteruit aanpassen ten opzichte van het lichaam van het kind. Draai met de inbussleutel (meegeleverd) de bouten los waarmee de haakarmen onder de plaat bevestigd zijn. Zet de plaat in de gewenste positie en draai de bouten stevig vast.