

met wasbare bekleding -- 70-150-0

Art: AD150767



Productinformatie

Dit kleine opblaasbare spalkje werd speciaal ontwikkeld voor personen met ernstige hand- en vingercontracturen, bv. na CVA.

De Parsnip bestaat uit een kegelvormige Urias®-Johnstonespalk, 2 bekledingen en een pompje. De bekleding is wasbaar voor extra comfort en hygiëne.

Er worden 2 bekledingen voorzien, zodat deze regelmatig kan gewassen worden zonder dat de persoon de spalk hoeft te missen.

De spalk wordt met de punt vanaf de wijsvinger door de gesloten hand getrokken door aan het lusje te trekken tot de gewenste plaats bereikt is.

Vervolgens pompt men de Urias®-Johnstone spalk op met behulp van het pompje tot de gewenste dikte bereikt is. Voor het verwijderen van de Parsnip steekt men het pompje omgekeerd in het buisje. De Parsnip spalk is eenvoudig te gebruiken en kan ook door een begeleider of familielid aangelegd worden.

De spalk en de bekleding kan met de hand gewassen worden, gebruik makend van een milde zeep en lauw water.